

#### **Способ применения медицинского изделия**

1. Перед использованием средства, проверьте целостность упаковки и дату истечения срока годности, нанесенную на упаковку.
  2. Протереть/промокнуть кровоточащую рану салфеткой для удаления всей напывшей крови.
  3. Распаковать средство. Не выбрасывайте упаковку после ее открытия!
  4. Заполнить всё пространство раны средством или наложить несколько слоев поверх места повреждения (в зависимости от характера раны). При проникающих ранах средство можно закладывать непосредственно в раневой канал. Прижмите средство рукой прямо над источником кровотечения.
- Внимание!** В экстремально тяжелых ситуациях может потребоваться более одного средства.
5. Средство прижимается рукой в течение 3-5 минут или пока кровотечение не остановится. Обычно гемостаз достигается в течении 3 минут. Тем не менее, иногда возникает необходимость оставить рану нетронутой на неопределенный период времени.
  6. Наложите тугую бинтовую повязку, либо намотайте поверх раны остаточную длину средства, чтобы сохранить давление и зафиксировать его положение.
  7. Кровоостанавливающее средство можно оставить на месте на период до 24 часов. Осторожно снимите средство. Если средство трудно снять, увлажните его стерильным физраствором. В конце процедуры тщательно промойте рану.